


# Extra Mineral Oil<sup>TM</sup>

洗浄・ろ過滅菌・POV測定検査<sup>※1</sup>済組織培養用ライトミネラルオイル



Extra Mineral Oil<sup>TM</sup>は高品質オイルを使用、  
洗浄・ろ過滅菌・POV測定検査<sup>※1</sup>済で  
厳しい品質管理プログラムに合格した製品のみリリースされております。  
より一層安全に、安心して  
胚培養およびICSI操作時等のオイルカバーとしてご使用いただけます。

※1 European Pharmacopoeia(EP)に準拠

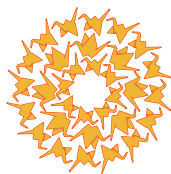

ORIZURU ART FAMILY

**長い使用期限**

製造後

12ヶ月

18ヶ月

**マルチボトル**

20ml

50ml

100ml

500ml

**用途**

胚培養およびICSI  
操作時等のオイルカバー

**洗浄・ろ過滅菌済み  
組織培養用ライトミネラルオイル  
(POV測定検査済み)**

Extra Mineral Oil™はpre-washされた、薬局方品質のライトパラフィンオイルです。超純水(Ph Eur)で2回洗浄を行い0.2µmのフィルターでろ過滅菌しています。

品名	型番	保存条件	使用期限 (製造後)	数量	定価		
Extra Mineral Oil™ ◆ガラスボトル型	◆ EMO-500-G	+2℃~+25℃	18ヶ月	500ml×1本	13,005円		
	◆ EMO-100-G			100ml×1本	4,605円		
	◆ EMO-50-G			50ml×1本	3,905円		
	◆ EMO-20-G			20ml×5本	6,505円 (1,301円/1本)		
Extra Mineral Oil™ ●スクリュウキャップ プラボトル型	● EMO-500-S			+2℃~+25℃	12ヶ月	500ml×1本	13,005円
	● EMO-100-S					100ml×1本	4,605円
	● EMO-50-S					50ml×1本	3,905円
	● EMO-20-S					20ml×5本	6,505円 (1,301円/1本)

Sterility 滅菌性	無菌(SAL 10 <sup>-3</sup> )
Density 密度	0.83 - 0.86 g/ml
Viscosity 粘性	<30cP(30℃の場合)
Endotoxine 内毒性	< 0.1 EU/mL
Mouse embryo test (MET)	120時間培養後のプラストシスト達成率≥ 80%
Peroxide value (POV) 過酸化物質	<0.1 mEq/kg
Composition 成分	Mineral Oil ※欧州薬局方品質のパラフィンオイルを原料とし同品質の超純水を使用して製造しています。

**ラベルの説明**

商品名: Extra Mineral Oil™  
 型番: REF EMO-50-S  
 ロット番号: LOT EMO-1601  
 使用期限: 2018-XX-XX  
 保存温度範囲: 2℃

COA Extra Mineral Oil™

Batchnumber	EMO_50
Production date:	08/03/2018
Expiry date:	30/09/2019
Release date	23/03/2018
Total volume (ml)	132000
-----	
Viscosity (cP at 30℃)	20.8
Density	0.85
Appearance	PASSED
<b>POV</b>	<b>0mEq/kg</b>
MEA (1-cell)	80% blastocyst after 96h in culture
Endotoxines	<0.25EU/ml

品質管理評価証明書(例)

European Medical Device Directive に準拠した設備で管理された環境により製造し、規制に基づいた品質管理を実施しています。

参考文献

●Nasr-Esfahani M.H., Razavi S., Mozdarani H., Mardini M., Azvagi, Relationship between protamine deficiency with fertilization rate and incidence of sperm premature chromosomal condensation post-ICSI, Andrologia (2004),Vol.36,pp.95-100

取扱注意

- 商品包装の破損、封印シールが剥がれているもの、および有効期限が過ぎている商品は使用しないで下さい。また商品の性質上、凍結はできません。
- 記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品が若干異なる場合があります。
- 本製品は薬事法に定めるところの「医薬品」「医薬部外品」ではありません。
- 本製品は組織培養培地(研究用)であり、体外診断薬・医薬品・医療品ではありません。また、ヒト又は動物の治療に用いるものではありません。
- 異物の混在や溶液にコンタミネーションのような不均一な濁りがみられた場合、色調の変化などの異常が認められた時には使用しないで下さい。
- 衛生条件を守るために本製品は無菌操作によってのみ開封・使用して下さい。
- 使用方法は取扱説明書をご熟読頂き、内容を十分ご理解の上、正しくご使用下さい。
- 製品本来の使用目的以外での使用及び誤用によって生じた事故並びに損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いません。

■ お問い合わせ先



統括本部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目10番9号 箕面フレールビル5F  
 ☎ 0120-105-312 FAX.0120-705-312  
<http://www.medi-con.co.jp>

メディー・コン インターナショナル 検索

このカタログは2019年1月現在のものです。